

**PRODUTO**

Gesso Tipo III - Pedra

INDICAÇÃO DE USO

O gesso Pedra Tipo III Imodonto é indicado para confecção de trabalhos laboratoriais que exijam resistência mecânica elevada, é do tipo alfa, com tempo de presa baixo, possui granulometria fina, brilho nacarado e sedoso, características que facilitam o processo de acabamento do modelo; a fim de se obter um melhor aproveitamento do gesso Tipo III Imodonto é recomendado a manipulação do gesso em ambientes higiênicos, com instrumentos limpos, secos e água filtrada*.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Consistência: 30 a 40 ml de água para 100g de pó.

Tempo de trabalho: 2 a 8 minutos.

Tempo de presa: 8 a 10 minutos.

Tempo de estabilização do gesso: 2 horas em local seco e arejado.

Resistência à compressão: 400 Kgf/cm².

COMPOSIÇÃO: Sulfato de Cálcio (Alfa Hemidratado), corantes e aromatizantes eventualmente.

INSTRUÇÕES DE USO

Molhe a cuba plástica e deixe escorrer o excesso de água. Coloque a quantidade correta de água filtrada dentro da cuba plástica e adicione o pó lentamente, para evitar bolhas.

Espatule de modo circular, para evitar a formação de bolhas, por 1 minuto ou até a massa ficar homogênea.

ATENÇÃO: Usar máscara para evitar inalação.

Armazenamento: Guardar em recipiente fechado, em local seco e arejado.

Validade: 5 anos após embalado.

Disponível nas cores: salmão, amarelo.

REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

*para garantir a qualidade do gesso e evitar a proliferação de fungos no modelo, efetue a limpeza da caixa d'água semestralmente.