

# Ficha Técnica

# New Form



## Dente Acrílico

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

### CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- ✓ Prensagem de 2 camadas.
- ✓ Aspecto natural e mamelos evidenciados.
- ✓ Modelário Europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- ✓ Fabricado com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que faz aderir melhor à base.
- ✓ Com Crosslink, garantindo alta resistência mecânica, química e à abrasão.
- ✓ Ampla opção de cores com alta estabilidade.
- ✓ Pigmentos biocompatíveis.
- ✓ Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
- ✓ Angulação de 35° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.



### MODELOS

Anteriores Superiores:

SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SF3, SF4, SG2, SG3, SH1, SH3, SH4, SI1, SI2, SL1, SL2, SL4, P18.

Anteriores Inferiores:

IK2, IK3, IK5, IK6, IK7, IK9, IK10, IK12, P18.

Posteriores Superiores e Inferiores:

PM2, PM3, PM4, PM5, PM6.

### CORES

A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, C2.

### COMPOSIÇÃO

- Polimetacrilato
- Dimetacrilato de Etileno Glicol
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatíveis

### INSTRUÇÕES DE USO

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base dos dentes com uma ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras REMOVEC.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos e álcalis.

Tabela de articulações

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores
SE1	IK3 - IK5	PM2
SE2	IK5 - IK6	PM4
SE3	IK6	PM4
SE4	IK9	PM5
SE5	IK10	PM5
SF3	IK2 - IK5	PM3
SF4	IK9 - IK10	PM5
SG2	IK6 - IK7	PM2
SG3	IK6	PM4
SH1	IK7	PM2
SH3	IK3	PM3
SH4	IK3 - IK5	PM4
SI1	IK7	PM2
SI2	IK5	PM3
SL1	IK9	PM4
SL2	IK12	PM4
SL4	IK12	PM5
P18	P18	PM6

# Ficha Técnica

# New Form



## Dente Acrílico

### **ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES**

Conservar ao abrigo de luz e calor.  
Somente para uso odontológico.  
Utilizar tabela de articulação e escala de cor New Form.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

**VALIDADE:** 10 anos a partir da data de fabricação.

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

■ Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Com.,  
Importação e Exportação Eireli - ME  
Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - SP  
CEP: 13.632-302 - www.imodonto.com - sac@imodonto.com  
Fone: (19)3565-2716 - (19)3561-5292 - Indústria Brasileira.  
CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01