

**PRODUTO**

Verniz selante transparente fotopolimerizável.

INDICAÇÃO DE USO

IMOSEAL é indicado para resinas acrílicas, fotopolimerizáveis e 3D.

EMBALAGENS

Frasco com Tampa 15 ml.

COMPOSIÇÃO

- ✓ TPO
- ✓ Metilmetacrilato
- ✓ DMT
- ✓ Inibidor

INSTRUÇÕES DE USO

Alise a prótese com a Lixa Imodonto e efetue em seguida um polimento com Imobril Bivalente.

Não use agentes de limpeza à base de óleo.

Seque bem a superfície aplicando jatos de ar sem óleo.

A aplicação é feita com um pincel pequeno e macio. Primeiramente pingue algumas gotas em um dappen, e aplique a primeira camada de forma suave e uniforme, sempre no mesmo sentido, leve para a cabine UV por 60 segundos

Aplique a segunda camada da mesma forma e leve a cabine por 60 segundos.

Se necessário aplique a terceira camada e leve a cabine por 120 segundos.

Caso não necessite da terceira camada, terminar o ciclo sempre com 120 segundos.

Nota: Para limpeza do pincel, utilizar Líquido Termo

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Brilho eficiente em resinas acrílicas e Impressas.
- Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdentais.
- Veda micro poros existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante.
- Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos e em resinas impressas.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Somente para uso odontológico;
- ✓ Iniciar a fotopolimerização ainda na fase com brilho
- ✓ Líquido: Material muito inflamável, não tóxico (Ponto de Fulgor: -4°C);
- ✓ Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;
- ✓ O manuseio desta resina não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto;
- ✓ Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;



- ✓ Conservar ao abrigo da luz e calor, sempre abaixo de 25°C;
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

VALIDADE

2 anos após data de fabricação.

ANVISA Nº: 82503109009

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291