



## PRODUTO

Gelatina duplicadora.

## INDICAÇÕES DE USO

Duplicação de moldes protéticos nas fundições

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Possui alto poder de cópia;
- ✓ Permite maior aproveitamento devido a sua excelente fluidez;
- ✓ Pode ser reciclado adicionando-se água até atingir a fluidez necessária;
- ✓ Pode ser derretido em banho Maria, em equipamento próprio ou micro-ondas;
- ✓ Não forma resíduos mantendo a qualidade e translucidez inicial;

## EMBALAGENS

1kg e 4kg.

## COMPOSIÇÃO

- ✓ ÁGUA
- ✓ AGAR-AGAR
- ✓ GLICERINA
- ✓ ANTI-ESPUMANTE
- ✓ CONSERVANTES

## INSTRUÇÃO DE USO

Cortar o DUPLICART em pequenos pedaços (aproximadamente cubos de 1 cm) em uma panela para facilitar a liquefação. Levar ao fogo, sem deixar ferver.

Deixar esfriar até cerca de 50°C e verter a mufla, tomando cuidado prévio de enxugar o modelo de gesso, anteriormente mergulhado em água. Após verter, deixar esfriar até endurecer, para preencher com revestimento.

## REGISTRO DA ANVISA N°:

"Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973"

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291