



### INDICAÇÕES DE USO


IMOGLOSS é a solução para dar brilho e acabamento em enceramentos e provas em ceras. Pode ser utilizado em enceramentos de prótese total e de dentes em prótese fixa.

### CARACTERÍSTICAS

- Líquido com baixa viscosidade;
- Proporciona brilho rapidamente, em enceramentos e provas de dentes em cera;
- Brilho é duradouro;
- Proporciona uma melhor experiência ao paciente durante a prova do enceramento.

### VANTAGENS

- Fácil aplicação.
- Secagem rápida.
- Resistente à riscos
- Proteção contra a temperatura bucal.
- Proporciona lisura a superfície do modelo de cera.
- Proporciona brilho mesmo em modelos onde existe o efeito "casca de laranja"

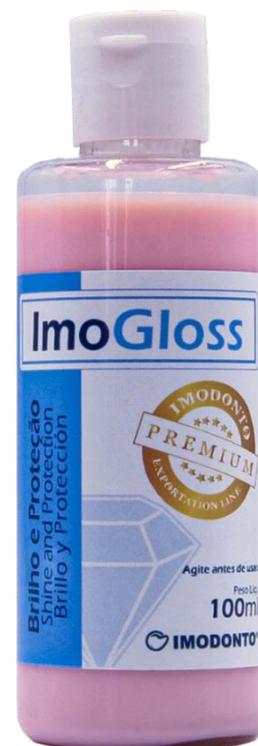

### INSTRUÇÃO DE USO

Aplicado facilmente com uma bolinha de algodão sobre o enceramento e em poucos segundos este enceramento estará com um belíssimo brilho, resistente à riscos e de alta durabilidade.

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Agite bem antes de utilizar.

### EMBALAGEM

Embalagem com 100ml

### COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica e água destilada.

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, com temperatura entre 2 e 28°C.

### VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação.

### ANVISA Nº

Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 24/2009.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291