



Dente Acrílico

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- ✓ Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
- ✓ Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
- ✓ Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- ✓ Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- ✓ Contém carga de OMC, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
- ✓ Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- ✓ Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- ✓ Pigmentos biocompatíveis.
- ✓ Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
- ✓ Cumpre ISO 22112
- ✓ Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.



MODELOS

Anteriores Superiores:

E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B.

Anteriores Inferiores:

L1, L3, L5, L6, L7, L10, K6, K10, K12.

Posteriores Superiores e Inferiores:

M2, M3, M4, M5, M6.

CORES

A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, C2.

COMPOSIÇÃO

- Polimetilmetacrilato
- EDMA
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatíveis
- Cerâmica Organicamente Modificada

INSTRUÇÕES DE USO

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base dos dentes com uma ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras REMOVEC.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos e álcalis.

TABELA DE ARTICULAÇÃO

Anterior		Posterior
E 2	L 5	M 2
E 3	K 6	M 4
E 4	L 5	M 4 - M 6
F 4	K 10 - L 10	M 4 - M 6
G 3	K 6	M 4
H 3	L 3	M 3
H 4	L 3	M 5
L 2	K 6	M 4
L 4	K 12 - K 10	M 4 - M 6
O 31	L 5	M 3
O 32	L 3	M 5
O 36	L 7	M 4
R 11	L 1	M 3
R 12	L 5	M 3
R 13	L 5	M 3
R 14	L 7	M 4 - M 6
R 17	K 10	M 6
R 66	L 5	M 5
T 21	L 3	M 3
T 22	L 3	M 3 - M 5
T 25	L 10	M 4
T 44	L 3	M 3 - M 5
T 4B	L 5	M 2

Ficha Técnica

New TRI



Dente Acrílico

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.
Utilizar tabela de articulação e escala de cor New TRI.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

VALIDADE: 10 anos a partir da data de fabricação.

ANVISA:

Registro ANVISA Nº: 81912530001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

■ Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Com.,
Importação e Exportação Eireli - ME
Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - SP
CEP: 13.632-302 - www.imodonto.com - sac@imodonto.com
Fone: (19)3565-2716 – (19)3561-5292 - Indústria Brasileira.
CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01